

## Arbeitsmittel

### Mund-Nase-Bedeckung (MNB)

(Selbstgenähter Gesichtsschutz, Behelfsmaske oder Papiermasken gemäß Empfehlungen der BAuA zum Einsatz von Schutzmasken im Zusammenhang mit SARS-CoV-2. Stand: 27.04.2020)

## Schutzziele

**Schutzziele am/für Träger:** Minderung der Tröpfchen-Freisetzung; Minderung der Kontaktberührung (Schmierinfektion) mit Mund und Nase (Schleimhäute). **Schutzziele für Beteiligte:** Geringere Virenkonzentration in der Umgebungsluft eines Ausscheiders. **Ziel des Einsatzes:** Unterbrechung der Infektionswege, vorwiegend Fremdschutz.

## Einsatz und Verhaltensregeln



Verwenden Sie eine Mund-Nase-Bedeckung (z.B. eine genähte Maske aus Baumwolle), wenn nicht sicher ist, dass der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann

### Anziehen

- Vor dem Anziehen der Maske und nach dem Ausziehen der Maske gründliche Händereinigung (Waschen 20-30 Sekunden) oder (wo Hände waschen nicht möglich) Händedesinfektion.
- Beim Anziehen die Innenseite der Maske nicht mit den Händen berühren. Zum Aufsetzen Maske vor Mund und Nase halten und mit den Bändern am oberen Kopf und im Nackenbereich bzw. mit den vorhandenen Gummibändern hinter den Ohren befestigen.
- Sofern vorhanden, Nasenbügel fest andrücken, so dass keine Leckagen entstehen.
- Maske angenehm im Gesicht mit dem unteren Rand unterhalb des Kinns, oberen Rand auf dem Nasenrücken positionieren.
- Danach Handkontakt mit Maske vermeiden. Hände aus dem Gesicht halten.
- Feuchte Maske wechseln.



### Ausziehen

- Beim Ausziehen der Maske wieder nur den Rand oder die Gummis bzw. Bänder anfassen, damit die Hände nicht mit potentiell vorhandenen Viren verunreinigt werden. Einmalartikel wegwerfen (oder siehe unten „Maßnahmen bei Wiederverwendung“)
- Feuchte Stoffmasken in separater Tüte oder Behältnis transportieren. Zuhause schnellstmöglich waschen.
- Reservemasken in Tüten oder (Kunststoff)-Behältern trocken und vor Verschmutzung lagern und transportieren.
- Stoffmasken in der Waschmaschine mit Vollwaschmittel waschen (60°C- bis 95°C-Waschprogramm). Danach müssen die Masken trocknen. Stoffmasken können auch 5 Minuten ausgekocht werden.



### Maßnahmen bei Wiederverwendung

- In Zeiten von Lieferengpässen kann eine Wiederverwendung des Mund-Nasen-Schutzes über einen Arbeitstag bzw. eine Schicht angezeigt sein.
- Die Maske muss einem Mitarbeitenden eindeutig (ggf. durch Namen) zuzuordnen sein.
- Innenseite der Maske bei der Handhabung nicht kontaminieren.
- Zwischen den Einsätzen muss sichergestellt werden, dass die trockene Ablage der Maske an der Luft an einem abgegrenzten, dem Publikum nicht zugänglichen Bereich stattfindet.
- Beim nochmaligen Aufsetzen der MNB, die MNB an den Bändern anfassen und befestigen, danach erneute Händereinigung/-desinfektion (s.o.).
- Der Ablageort muss direkt nach dem erneuten Aufsetzen der Maske gereinigt werden.

### Wechselintervall

- Feuchte MNB wechseln (unabhängig von der Tragedauer)
- Ansonsten täglicher Wechsel unter Beachtung o.g. Hinweise

## Verhalten bei Mängeln und im Gefahrenfall



- Unregelmäßigkeiten bei der Nutzung oder beim Feststellen von Mängeln, die den sicheren Betrieb betreffen, sind sofort dem zuständigen Vorgesetzten zu melden.
- Eigenschutz beachten. Defekte Masken nicht verwenden. Bei erkennbaren Gefährdungen ist der Betrieb sofort einzustellen.
- Im Notfall Ersthelfer\*in hinzuziehen, ggf. Notruf absetzen: # - 112 (von allen Telefonen der Universität möglich) und Unfall melden.
- Unfallanzeige erstellen, ggf. Durchgangsarzt aufsuchen und arbeitsmedizinische Vorsorge in Anspruch nehmen.

## Lagerung, Reinigung und Pflege

s. Einsatz und Verhaltensregeln

## An- und Ablegen

s. Einsatz und Verhaltensregeln



Weitere Informationen des Arbeitsschutzes im CMS